


Harvard LuteCem SE

Savaime surišantis dvejopo kiet jimo derva
modifikuotas cementas

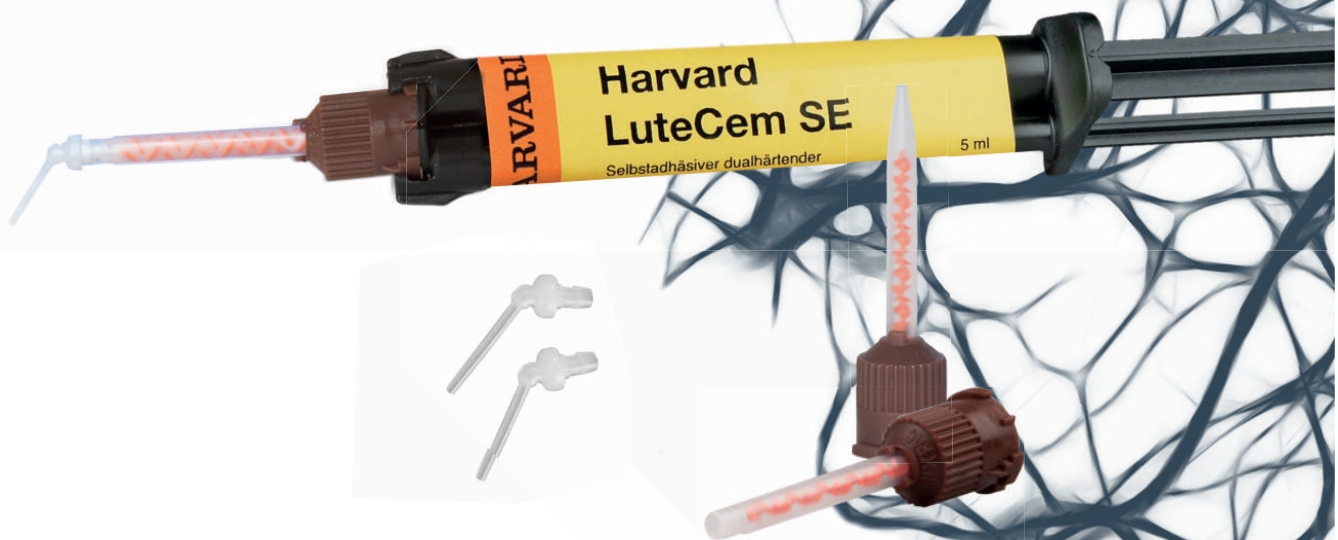

- Savaime surišantis cementas: nereikia sdinti, naudoti atskiros surišimo sistemos
- Geras kraštinis sandarumas
- Patogi naudoti konsistencija
- Atsparios spalvos poky iams restauracijos
- Didelis fluorida jon išskyrimas
- Dvigubo kiet jimo savyb s
- Puiki estetika



Indikacijos

- Kaiš i cementavimui
- Vainik li ir tilt cementavimui



Fizikinės Savybės


Medžiagos plėtimosi jėga emalio ir dentino paviršiuje

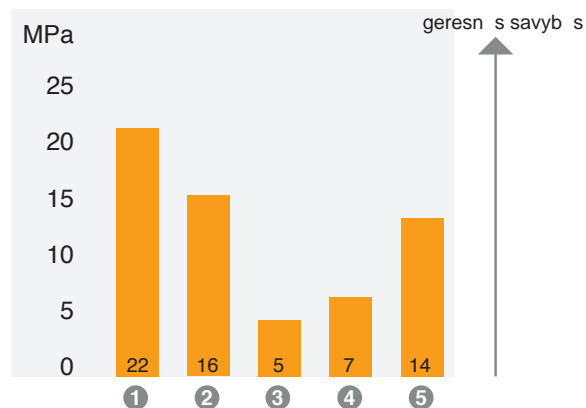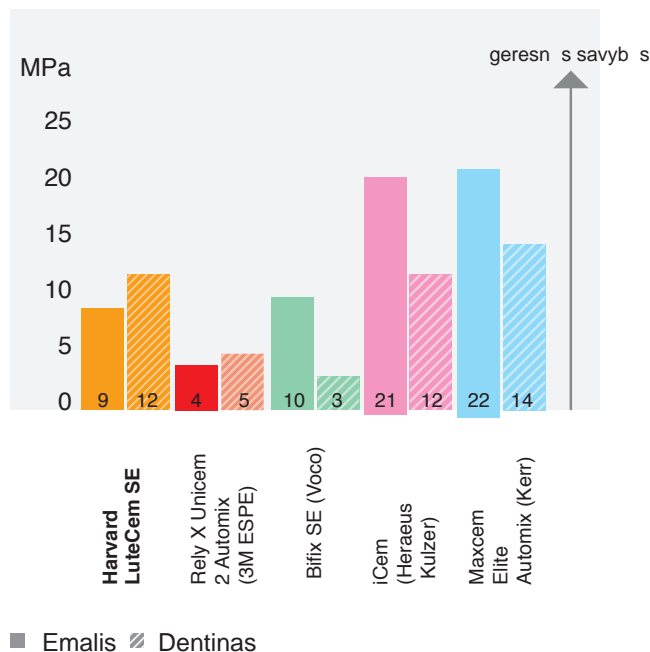

Harvard LuteCem SE plėtimosi jėga protezuojant skirtingomis medžiagomis:

- 1 Netaureisiais metalais
- 2 Cirkoniu
- 3 Silikato keramika
- 4 Titanu
- 5 Kompozitu

Didelis fluorido jonų išsiskyrimas

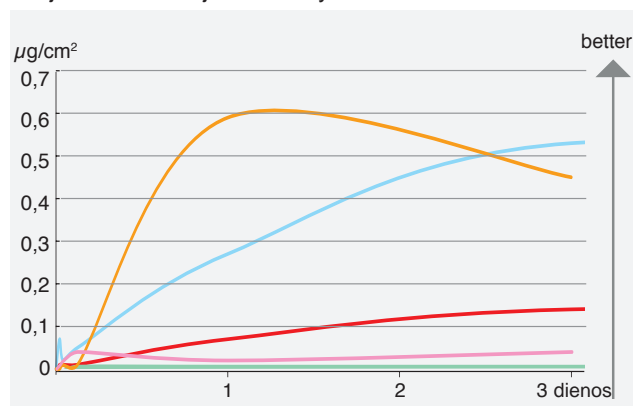

- Harvard LuteCem SE
- Rely X Unicem 2 Automix (3M ESPE)
- Bifix SE (Voco)
- iCem (Heraeus Kulzer)
- Maxcem Elite Automix (Kerr)



*Internal data by Harvard Dental International

Savybės ir privalumai

Savaime surišantis cementas: nereikia ėsinti, naudoti surišėjo

- **Paprasta, patogi ir laiką taupanti procedūra**

Patogus aplikavimas

- **Automatinis maišymas**
- **IntraTips tinkamos aplikavimui šaknų kanaluose**
- **Dviejų tipų maišymo antgaliukai**

Lengvas medžiagos valdymas

- **Lengva pašalinti medžiagos perteklių**

Patogi konsistencija

Plonas medžiagos sluoknis

- **Puikiai tinka galutinės restauracijos tvirtinimui**

Trys kietinimo tipai:

- **Kietinimas šviesa vienmomentės fiksacijos metu**
- **Savaiminis kietėjimas - patikimam padengimui**
- **Dvigubo kietėjimo cementas**

Didelis fluorida jonų išskyrimas

- **Apsaugo nuo karieso atsiradimo**

Ilgalaikis spalvos išlaikymas

- **Puiki estetika**
- **Platus spalvų pasirinkimas: skaidri, A2, A3**


Praktiškai jokio medžiagos susitraukimo

Aplikavimas


Kaiščio cementavimas



Paruoškite danties šaknies kanalą cementavimui

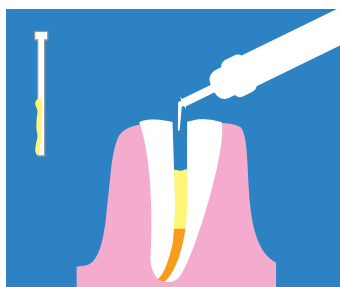

Aplikuokite **Harvard LuteCem SE** ant kaiščio ir į danties šaknies kanalą

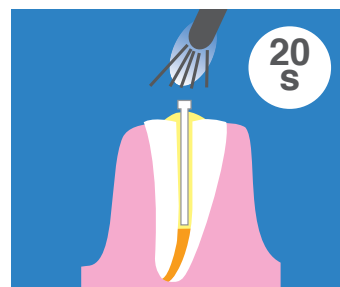

Pozicionuokite kaištį šaknies kanale, vainikinėje dalyje esantį kaištį su cementu kietinkite šviesa

Vainikėlio cementavimas



Aplikuokite cemento į vainikėlio vidų



Nusodinkite vainikėlį ir kietinkite šviesa



Lengvai pašalinkite medžiagos perteklių



Techniniai duomenys

Savaime surišantis dvejojo kietėjimo derva modifikuotas cementas

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Medžiagos plėtimosi jėga emalio/dentino paviršiuje | 9 / 12 MPa |
| Atsparumas kramtomajam spaudimui | 180 MPa |
| Sluoksniu storis | 12 μ m |
| Darbinis laikas | 1:30 min |
| Kietėjimo laikas (savaiminis kietėjimas) | 4 min |
| Šviesa kietinant (pasirinktinai) | 20 sec |

Prekės

Harvard LuteCem SE

5 ml Minimix švirkštai

15 maišymo antgaliukų, 5 IntraTips antagliukai

Skaidri meždiaga

A2 spalva

A3 spalvos opakeris

Papildymas su 50 maišymo antgaliukų (Mini 4/10:1 O-Brown)

Papildymas su 50 maišymu antgaliukų (Mini 4/10:1 S-Brown)

Papildumas su 50 IntraTips antgliukų

Užsakymo numeris

7081101

7081105

7081106

7091100

7093050

7083620